



見守り介護ロボット aams.介護

How to 操作マニュアル

※一般職員様向け



株式会社 バイオシルバー  
お客様窓口 06 - 6809 - 7716

# 目次

- 1.基本設定
- 2. 主な使い方
- 3.各種履歴の見方
- 4.よくある質問

1.基本設定	.....3
2. 主な使い方	.....5
3.各種履歴の見方	.....7
4.よくある質問	.....9



# 1

## 章

### 基本設定

#### 1.基本設定

#### 2. 主な使い方

#### 3.各種履歴の見方

#### 4.よくある質問

## aamsの起動について

①下記の順番で電源を入れて下さい。

①アクセスポイント



②管理サーバー



③センサーマット



補足  
説明

①施設wifiの場合は不要。

②サーバーの電源ボタンは導入時期により異なります。また電源ボタンは長押ししない事。

②モニター(PC、タブレット等)画面上にある「chrome」又は「aamsアイコン」をクリックして下さい。

補足  
説明

Wifiの場合はデバイスが無線に繋がっていることを確認下さい。



③画面上に下記のようなトップ画面が表示されます。



下記の画面が表示される場合、管理サーバーに記載のURL (例192.168.100.1)を入力。

※ 入力例  
`http://192.168.100.1/aams/`



★ID・パスワードは施設様により異なります。

1.基本設定

2. 主な使い方

3.各種履歴の見方

4.よくある質問

一覧画面について



◆部屋名・利用者名の選択(変更方法)

★見守り一覧画面のメニュータブ内、ベッド情報設定から内容を変更します。



◆アラート通知したい項目の選択

★各項目のアイコンをクリックすることでオン/オフの切り替えます。



有効(オン)→水色

無効(オフ)→グレー



- ◆利用者ごとに、どのような項目でアラート通知したいのか?を決めることができます。
- ◆ここで無効(グレー)になっているとその項目でのアラート通知はしません。都度、ご確認下さい。



# 2

## 章

### 主な使い方

#### 1. 基本設定

#### 2. 主な使い方

#### 3. 各種履歴の見方

#### 4. よくある質問

### アラートの開始/停止

★見守り開始(アラートの開始)は「開始」ボタンをクリックして有効(水色)にして下さい。

有効(オン)→水色



★アラートを停止するときは「確認」ボタンをクリックして下さい。



◆右記のように「停止」ボタンでもアラートを止めることができます。再度見守りを開始したい時は「開始」ボタンをクリックする必要がありますのでご注意ください。




【重要】アラートを停止しないまま使用を続けると、サーバーに負荷が掛かりフリーズする可能性があります。アラート後「確認」ボタンをクリックする習慣をお願いします。

### 見守りを一時停止したい時

★夜間、パット交換時にアラートを鳴らしたくない、といったケースで使用できます。

#### 見守りの一時停止

センサーユニットの一時停止ボタンを押すことで、見守りを一時的に停止することができます。  
※ボタンを押すと見守りを一時停止し、5分後に自動的に見守りを開始します。  
※5分以内に再度ボタンを押すと見守りを開始します。

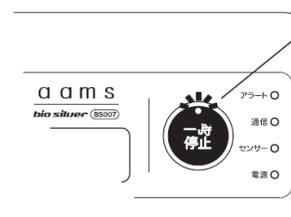

一時停止中はアラートLEDが点滅します。

# 2 章 主な使い方

## 1. 基本設定

## 2. 主な使い方


## 3. 各種履歴の見方

## 4. よくある質問

### リアルタイム波形の表示

★一覧の「グラフアイコン」をクリックすると  
下記のような波形画面が表示されます。

**補足説明** ご利用者毎の表示になります。  
(一度に複数人を表示させることはできません)

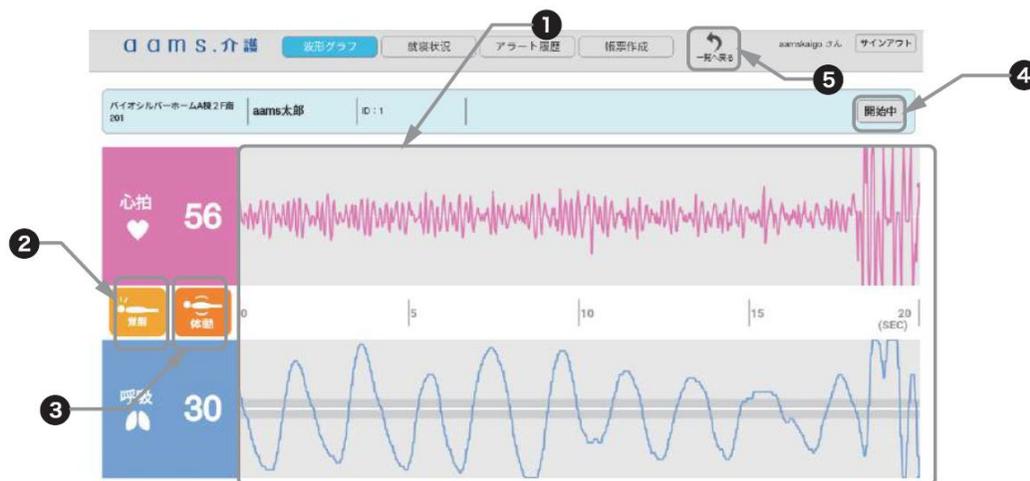

- ①リアルタイム波形
- ②着床・睡眠アイコン
- ③体動アイコン (体動がある場合のみ表示)
- ④見守り設定ボタン (見守りの開始/停止が出来ます)
- ⑤一覧へ戻る (見守り一覧画面に戻ります)

③



④



# 3 章 各種履歴の見方

1. 基本設定


2. 主な使い方

3. 各種履歴の見方

4. よくある質問

## アラート履歴の確認（個人別）

★リアルタイム波形の画面上部のメニューから「アラート履歴」タブをクリックして下さい。利用者毎のアラート履歴画面が表示されます。

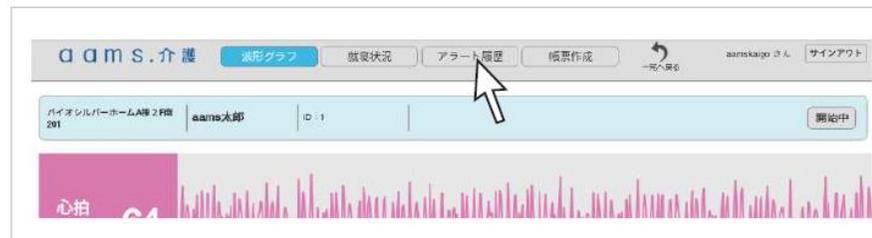

### ◆アラート履歴画面

利用者	発生日時	アラート内容	詳細	波形
aams太郎	2019/02/05 17:25:02	離床が発生しました	[詳細]	[波形]
aams太郎	2019/02/05 17:12:43	離床が発生しました	[詳細]	[波形]
aams太郎	2019/02/05 17:10:53	起上がりが発生しました	[詳細]	[波形]
aams太郎	2019/02/05 17:04:52	離床が発生しました	[詳細]	[波形]
aams太郎	2019/01/30 05:21:37	離床が発生しました	[詳細]	[波形]
aams太郎	2019/01/30 04:31:22	離床が発生しました	[詳細]	[波形]

①アラート履歴一覧

②アラート履歴出力（アラート履歴一覧を印刷することが出来ます。）

③詳細出力（アラート発生時の詳細データを印刷することが出来ます。）

④波形データ表示（アラート発生時の波形データを表示）

**補足** 利用者全体のアラート履歴を確認することも出来ます。  
**説明** 印刷方法など詳細は取説P44～を参照下さい。

# 3 章 各種履歴の見方

1. 基本設定

2. 主な使い方

3. 各種履歴の見方


4. よくある質問

## 就寝状況の表示

★リアルタイム波形の画面上部のメニューから「就寝状況」タブをクリック、  
又は見守り一覧画面の「就寝状況」アイコンをクリックすると就寝状況画面  
が表示されます。



### ◆就寝状況画面

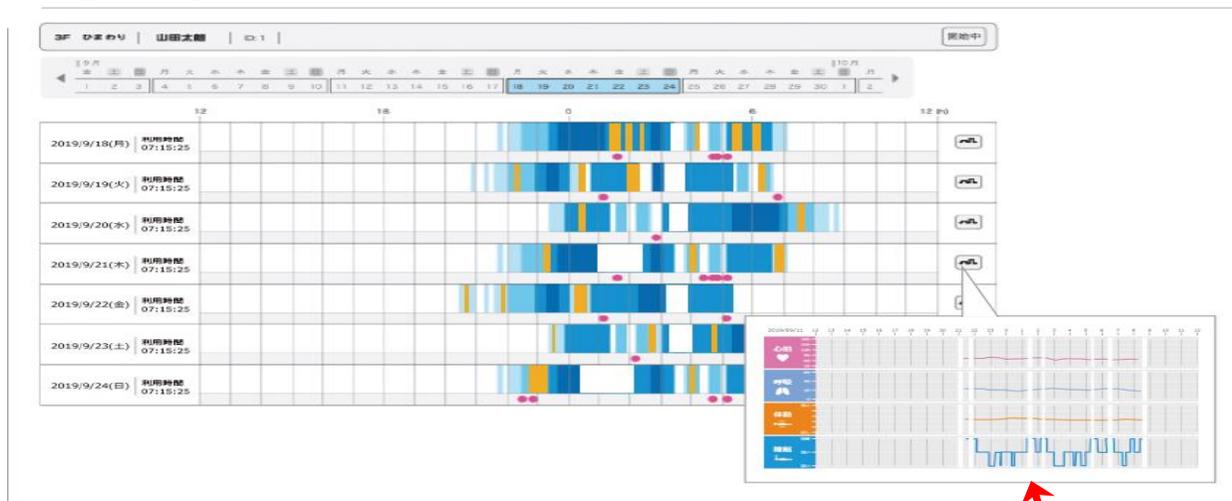

■ オレンジ:着床(覚醒)   ■ 薄青:浅い睡眠   ■ 濃青:深い睡眠  
□ 白:離床   ■ 灰:子機応答なし

**補足説明** 就寝状況画面の一覧（上記）の右にある「グラフアイコン」をクリックすると、詳細画面が表示されます。



# 4

## 章

### よくある質問

1. 基本設定

2. 主な使い方

3. 各種履歴の見方

4. よくある質問

## ◆故障かな？その前に。

### ①aamsのトップ画面が表示されなくなった。

(サイトにアクセスできません。などと表示)

→(wifiの場合) wifi接続できていますか？

→管理サーバーの電源を落として下さい。(長押しは厳禁です)

数秒後再度電源を入れて下さい。

### ②特定のセンサーが通信エラーと表示されている。

→センサーマットの電源を一度切ってください。数秒後電源を入れて下さい。

※頻繁に繋がったり切れたりする場合は無線が不安定な環境の可能性があります。

### ③アラートが鳴らない。

→「アラートしたい項目」がオン(水色)になっていますか？

→一覧画面で「見守り」ボタンが開始(水色)になっていますか？

### ④ベッドで臥床されているのに心拍や呼吸が表示されない。

アイコンも「離床」になっている。

→センサーマットの設置位置をご確認下さい。

→感度調整を行って下さい。(詳細は管理者向けマニュアル参照)



適切な設置位置の例  
(aamsが胸の下にある)



不適切な設置位置の例  
(位置が足の方に下がり過ぎ)