

Vivotek FD9166-HN-VVTK

Webカメラ操作ガイドライン

2023年3月

アラート発生時に映像を確認する方法

アラートが発生するとパネル内にカメラボタンが現れます。



このボタンを押すと、ライブ映像がブラウザから閲覧できます。
映像の確認が終わったら、開いたブラウザのタブを閉じます。

確認ボタンを押すと、カメラボタンは消えるため、カメラボタンを押してから確認ボタンを押してください。

センサーマットとカメラの紐づけ設定

- 1) aamsサーバーに管理者(“admin”)でサインインします。
- 2) メニューのマスター管理、センサー情報設定をクリックします。
- 3) 表示されたセンサー一覧より、紐づけるマットを選択します(Selectを押す)
- 4) カメラURLの欄に以下を入力

[http://\(カメラIPアドレス\)/aams.mjpg](http://(カメラIPアドレス)/aams.mjpg)

The screenshot shows a web-based form for managing sensor information. The form contains several fields: ID (1), 使用可否 (checked), 有効, 利用者名 (利用者 1), フリガナ, MACアドレス (00:D0:CA:01:1E:99), 変更, 性別 (dropdown), 生年月日 (calendar icon), 血液型 (dropdown), 部署名 (dropdown), and カメラURL (http:// xxx.xxxx.xxx.xxx[:ポート番号]). The カメラURL field is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for データ削除, 登録, 削除, and キャンセル.

- 5) 登録ボタンを押します

カメラへ直接アクセスする方法

- ライブ映像を閲覧する場合

同一ネットワーク上にあるPC/タブレット/スマホにてブラウザを起動し、以下のURLを入力する。

[http://\(カメラIPアドレス\)/aams.mjpg](http://(カメラIPアドレス)/aams.mjpg)

必要に応じて、ホーム画面にショートカットを作成する。

- カメラを操作する場合

同一ネットワーク上にあるPC/タブレット/スマホにてブラウザを起動し、以下のURLを入力する。

[http://\(カメラIPアドレス\)/](http://(カメラIPアドレス)/)

アクセスするとID/パスワードを入力するウィンドウが開く。

“root”についてはバイオシルバーにて設定している。

なお、Languageで日本語を選択すると日本語メニューを表示する、

録画データの閲覧(1)

録画データは、ブラウザでカメラにアクセスした状態では再生できず、一旦PC等にダウンロードする。

まず右上のメニューから「構成(configuration)」を選択、表示された左側のメニューから「ストレージ(Storage)」 「コンテンツマネージメント(Content management)」を選択する。

The screenshot displays the 'bio silver' web interface. The top navigation bar includes 'ホーム', 'クライアント設定', '構成', and '言語'. The left sidebar menu lists various system settings, with 'ストレージ' (Storage) selected and its sub-menu 'コンテンツマネージメント' (Content Management) highlighted. The main content area is titled 'ストレージ > コンテンツマネージメント' and contains several configuration sections:

- 検索 (Search):** Includes a search bar and a 'デバイスターゲット' (Device Target) section with radio buttons for 'すべてのデバイス' (selected), 'SD', and 'nas'.
- トリガーの種類 (Trigger Type):** A grid of checkboxes for various triggers: 'バックアップ' (checked), 'システム起動', 'デジタル入力', 'モーション', 'ネットワークエラー', '録画通知', '期間', 'SD カード寿命予測', 'タンパー検出', 'VADP', 'マニュアルトリガー', and '音声検知'.
- メディアタイプ (Media Type):** Radio buttons for 'ビデオクリップ' (selected), 'スナップショット', and 'テキスト'.
- 時間 (Time):** A section for setting search intervals with buttons for '1', '分', '時間', '日', and '週間'.
- 送信元 (Sender):** A date and time selector showing '2023/03/12' at '08:56 PM'.
- 対象 (Target):** A date and time selector showing '2023/03/19' at '08:56 PM'.

A '検索' (Search) button is located at the bottom right of the configuration area.

録画データの閲覧(2)

[検索]枠内の時間に、確認したい時間を指定する。

「送信元(From:)」に開始時間、「対象(To:)」に終了時間を入力する。(これは誤訳)

 ボタンを押すと、下の[検索結果]に該当時間を含むイベントが表示される。

検索結果

☐	名前	device	トリガー...	開始時間	終了時間
☐	recording	SD		昨日 午前12時0分	--

10 ▼

1 / 1

ダウンロード ロック/ロック解除 JPEGからAVI 削除

検索結果の全ての□にチェックを入れた後に、左下のダウンロードを押して、ファイルを自端末に落とす。

0時～24時までで1つで、日を跨ぐ場合は2つ表示される。

録画データの閲覧(3)

ダウンロードしたファイルはTAR形式(複数のファイルを1つのファイルにまとめたもの)になっている。

ファイル名: recording-yyyymmdd-hh_mm_ss-YYYYMMDD-HH_MM_SS.tar

解凍プログラムを使用して展開する

recording-yyyymmdd-hh_mm_ss-YYYYMMDD-HH_MM_SS/export/

exportの下に

yyyymmdd_hh_mm.mp4

というファイルが複数置かれている。

このファイル名が録画の開始時間になるため、閲覧したい時間のファイル名を選択し再生する。

1つのファイルの録画時間は1時間で、ファイルサイズは約10MB。



株式会社 バイオシルバー
お客様 窓口

受付時間 平日 10:00~17:00

土曜、日曜、祝日、弊社指定の休業日は除きます。
平日の上記の時間外は、営業担当にお問い合わせ願います。

TEL/FAX 06-6809-7716

製品の取扱い、設定方法等のお問い合わせ、その他に
ご質問がある場合にもご活用下さい。
製品のトラブル発生時など困りごとにも対応いたします。